
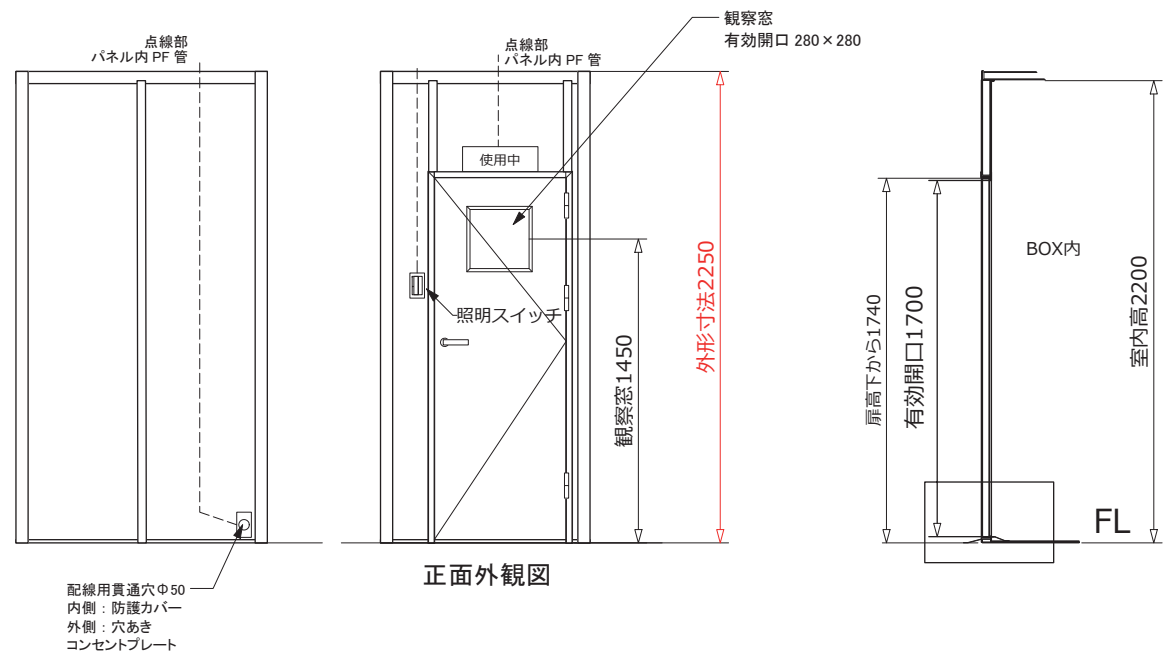


参考図 1

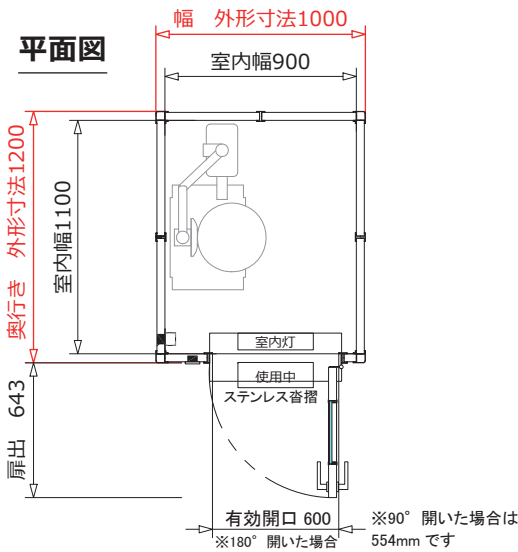

図中の X 線撮影装置は設置のイメージです。
実際の設置に関しては導入される
機器メーカー様との打合せが必要です。

組立式エックス線防護ボックス

Med-BOX

本体価格 ￥1,380,000-

※税別。設置に関する諸費用別途、線量測定費用別途

外寸	1,000 × 1,200 × 高さ 2,250
内寸	≒ 900 × ≒ 1,100 × 高さ≒ 2,200
総重量	約 340kg

防護面	天井面	鉛当量：1.5mm
	壁 4 面	鉛当量：1.5mm
	床面	鉛当量：1.5mm
鉛入りパネル	厚み	38mm
	表面材	ポリ合板：アイボリーホワイト色 (アルプス AB583VC)
	芯材	木積層材・ペーパーハニカムコア
扉	種類	片開扉
	有効寸法	幅 = 700(180° 解放時) 高さ = 1,880
	ハンドル	レバーハンドル (川口技研 LS-33-1M-N) 1 セット
	吊金物	面付旗蝶番 (ベスト No.127) 1 セット
観察窓	含鉛ガラス	LX プレミアム (水拭き可能)
	有効寸法	幅=280 高さ=280
柱材・天井梁	材質	アルミニウム
付属品	標識	管理区域標識 1 枚 患者用注意事項標識 1 枚 従事者用注意事項標識 1 枚
	室内照明 (天井付)	LED 照明：AC100V 明るさ 800lm (パナソニック XLX200NENLE9) 1 灯
	使用中表示灯 (使用中ランプ)	LED 照明：AC100 (片面型本体： パナソニック NNF11930LE1) 1 台 (消し文字パネル： パナソニック FK11571J)
その他	・ X 線機器配線用貫通穴φ50 1ヶ所 ・ 上記室内側防護カバー (ステンレス製) 1ヶ所 ・ 電源ケーブル (装置配線用貫通穴から 3m) ※室内照明 (天井付) 及び 使用中表示灯 (使用中ランプ) 用 ・ 操作盤取付用 補強下地	
オプション (有料対応)	・ 片開扉から親子扉及び引戸への変更が可能です。 ・ X 線装置取付用 補強下地 ・ 特注標識 管理区域標識、患者用注意事項標識、 従事者用注意事項標識は特注も可能です。 ・ 追加の配線貫通穴及び防護カバー ・ 換気扇 (天井付け) 標準サイズ：330 × 330mm 風量：180 m ³ /h (三菱電機 VD-15Z12) ・ 扉表面材の変更 カラー変更、ポリ合板→メラミン化粧板への 変更等 その他、記載のない事項もご相談ください。	

※この仕様書及び記載の品番等は予告無しに変更する場合がございます。

IEE

医建エンジニアリング株式会社

〒130-0026 東京都墨田区両国4-31-1ヒューリック両国ビル

TEL:03-3634-7301 MAIL:medisale@iken-eng.co.jp

- 【注意事項】

 - ・ 重量物のため設置場所の床耐荷重をご確認ください。
 - ・ 組立作業のためクリアランスが及び設置場所のスペース確認が必要です。
 - ・ 既存天井面と Med-BOX 天端とのクリアランス (すき間) は 150mm 以上必要です。
 - ・ 既存壁面と Med-BOX 壁面とのクリアランス (すき間) は 10mm 以上必要です。
 - ・ Med-BOX の設置場所は既存の室内照明 (天井付) 及び空調設備機器のメンテナンス等を考慮のうえご検討ください。
 - ・ 扉と既存設備や既存壁面等との干渉にご注意ください。
 - ・ Med-BOX の室内照明 (天井付) は配線ケーブルに付いているコンセントプラグを外部コンセントに差し込んでご使用ください。
 - ・ 使用中表示灯 (使用中ランプ) は Med-BOX の室内照明 (天井付) スイッチとの連動を標準とします。
 - ・ 使用中表示灯 (使用中ランプ) は X 線撮影装置との連動も可能です。 (連動させる配線作業は含みません)
- 【別途項目】

 - ・ X 線撮影装置及びその設置
 - ・ 空調、火災報知器、スプリンクラー等の設置 (空調、火災報知器、スプリンクラー等の設置は施設様側での対応となります。
 - ・ 空調、火災報知器、スプリンクラー等の設置は施設管理者様に設置の必要性や設置方法等についてご確認ください。
 - ・ 安全のため、火災報知器の設置を推奨いたします。)
 - ・ その他、本仕様書に記載以外の項目